

Jeringas veterinarias automáticas

0.5cc ThaMa 205
1cc ThaMa 210
2cc ThaMa 240
5cc ThaMa 215



Instrucciones de operación:

La jeringa ThaMa le da la posibilidad de inyectar la vacuna en la jeringa ajustable correcta.

Hasta 0.5cc – ThaMa 205

Hasta 1cc – ThaMa 210

Hasta 2cc – ThaMa 240

Hasta 5cc – ThaMa 215

Estas jeringas ajustables automáticas polivalentes han sido fabricadas con los mejores materiales, son resistentes al aceite y no corrosivas; todas las partes se pueden esterilizar hasta 125°C. El tubo está hecho de vidrio transparente y templado, graduado exactamente, permitiendo el ajuste correcto y el control continuo durante la operación.

Antes del uso:

Compruebe que todas las roscas estén bien atornilladas y que el tubo de vidrio no esté dañado. Asegúrese de que las válvulas, el resorte y las arandelas estén colocadas correctamente en su base. Ponga una gota de aceite de ricino en la junta tórica.

Establecer la dosis:

1. Desenrosque la tuerca del tornillo de ajuste.
2. Ajuste con el tornillo de ajuste al volumen necesario - utilice el pistón final como indicador.
3. Trabe con la tuerca del tornillo.

Preparación de la ampolla de vacunación:

1. Inserte la cánula larga a través de la cobertura de goma; asegúrese de insertarla hacia abajo de la parte inferior de la ampolla.
2. Conecte el tubo de plástico a la cánula larga en uno de sus extremos, y a la jeringa en el otro extremo.
3. Accione el mango de la jeringa hasta que la vacuna sea bombeada de la ampolla hacia la jeringa.

Después del uso:

1. Después de cada vez que se utiliza la jeringa, bombee la jeringa de 6 a 10 veces en agua limpia para eliminar cualquier residuo de material del cuerpo, de las agujas y del tubo (tenga cuidado de no pincharse con la aguja).
2. Abra el cobertor del cuerpo y lave todas las partes en agua limpia.
3. Abra el adaptador Luer Lock y la carcasa de tubo de la válvula, y lávelos con agua limpia.

Nota:

Atención: tenga mucho cuidado de no perder las piezas pequeñas, tal como válvulas, resortes de válvulas y arandelas de plástico de las válvulas.

Al hacer el pedido:

Añada el modelo del tipo de jeringa (205, 210, 240 o 215) antes del número de la pieza (por ejemplo: 205-01).

