

兽用连续注射器

0.5cc ThaMa 205



操作指南

ThaMa系列注射器：剂量准确、可调，满足您各种注射需求

最大剂量0.5cc - ThaMa 205

最大剂量1cc - ThaMa 210

最大剂量2cc - ThaMa 240

最大剂量5cc - ThaMa 215

该系列多用途可调剂量连续注射器由优质材料制成，不沾油、耐腐蚀；所有部件均可进行125℃高温消毒。玻璃管用清洁钢化玻璃制成，刻度精准、设计精良，确保操作过程连续可控。

使用前的准备：

检查所有接口均已拧紧，玻璃管完好无破损。确认阀钢珠、弹簧、垫圈安装在正确的位置。在“0”型圈上滴一滴润滑油。

剂量调整

1. 旋开调节螺母
2. 旋转调节螺丝至所需剂量刻度，以活塞末端为准；
3. 锁住螺母

使用完毕后

1. 每次使用完注射器后，用注射器抽取干净的水并排出，重复6-10次，以便去除注射器枪体、针头和软管中的残留物（小心不要被针头刺到）
2. 拧开枪体套，用清水清洗所有部件
3. 拧开鲁尔锁和软管连接器，然后用清水清洗。

说明：

请注意不要丢失小部件，如阀，阀弹簧以及阀垫圈等。

订货时：

请在零部件编号前标明注射器型号（如205-01）

