


兽用连续注射器

0.2cc ThaMa 263

固定剂量

提供3种不同剂量的活塞: 0.5cc, 1.0cc, 2.0cc, 并配有插瓶器。

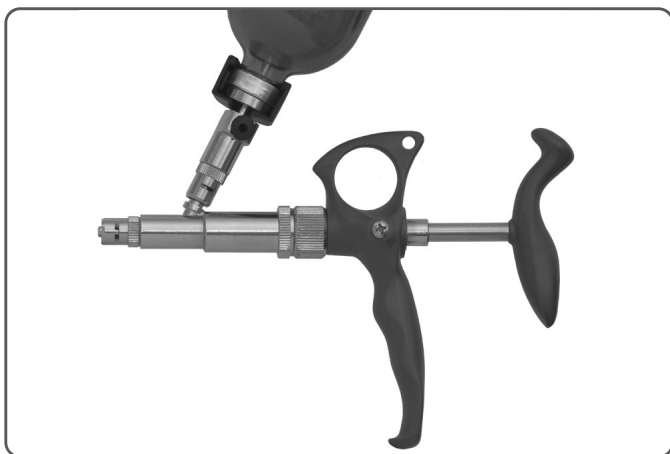

操作规程:

ThaMa263型注射器是一款剂量精确, 非常耐用的全金属、固定剂量连续注射器, 专为家畜集中注射而设计。注射器的所有部件均使用优质材料制成, 不沾油, 耐腐蚀。活塞可以在注射器的金属管腔中平滑的运行。

此款注射器提供3种不同剂量的活塞:

0.5cc, 1.0cc, 2.0cc.

所有部件均可在125°C高温消毒。

使用前的准备:

1. 建议在每次使用前对注射器进行消毒。
2. 检查并确认所有的螺母都已旋紧。
3. 确保阀弹簧和垫圈安装位置正确无误。

剂量设置:

1. 在注射器盒中找到“L”型针 (部件20)。
2. 用手握紧注射器的手柄并顺时针旋转注射器枪体套 (部件13), 将其拧开。
3. 推动手柄将活塞推至最前端, 然后将“L”型针插入活塞上的孔中。
4. 逆时针旋转“L”型针, 把注射器上原有的活塞卸掉, 更换成所需剂量的活塞。
5. 使用“L”型针将新活塞旋紧。
6. 从活塞上拿出“L”型针。
7. 在活塞的“O”型圈上滴一滴注射器原装配备的润滑油。
8. 安装上注射器枪体套, 并将其拧紧

如何使用插瓶器:

1. 取下插瓶器上的黑色塑料夹 (部件42)。
2. 将插瓶器 (部件43) 插入疫苗瓶中。
3. 装回塑料夹, 将其与注射器连接好。

请确认黑色塑料夹子已夹好!

使用后的维护与保养:

1. 将疫苗瓶从插瓶器上取下来。
2. 用注射器抽取干净的水并排出, 重复6-10次, 以便去除注射器枪体、针头和阀上的残留物。
3. 打开枪体套 (部件13), 用清水清洗所有部件。
4. 拧开鲁尔锁 (针头连接器, 部件02), 然后用清水清洗。
5. 清洗后在注射器枪体管中滴加适量的润滑油。
6. 重新安装好注射器。

注意, 小心保管不要遗失小配件, 如NBR 阀、阀弹簧和阀垫圈等。

强烈建议: 每次清洁后及组装注射器各部件时用润滑油润滑枪体管。

建议:

使用注射器原装配件可延长注射器的使用期限。此款注射器使用优质材料制成, 不沾油, 耐腐蚀。所有部件均可125°C高温消毒。

