

## 兽用连续注射器

# 双针鸡痘刺种枪



### 注入疫苗液：

1. 拧开刺种枪顶端螺帽，向上直立；
2. 直接将4cc疫苗液注入玻璃管中；
3. 扣上顶端螺帽，重点确认以下要点：
  - 橡胶垫圈安装正确
  - 两个刺种针安装正确
4. 轻轻拧紧顶端螺帽，确保针头能顺畅的出入；若不够顺畅，可微调刺种枪管口。

现在可以使用刺种枪了

### 清洁与保养

1. 打开刺种枪顶端螺帽，确认橡胶垫圈完好，并用清水清洗。
2. 取出玻璃管和配套的橡胶塞，用清水清洁。

确保刺种针的针眼完好，未被堵塞。

再次使用前可以对刺种枪消毒

双针鸡痘刺种枪由优质材料制成，不沾油、耐腐蚀；所有部件均可在125°C高温灭菌消毒。

