


兽用连续注射器

鸡痘刺种枪

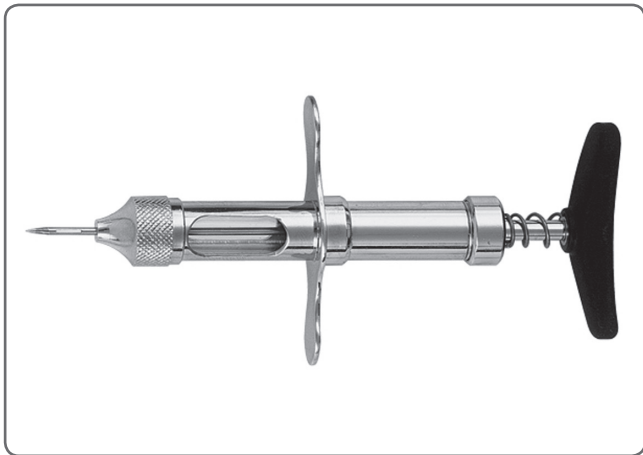

鸡痘刺种枪由优质材料制成，不沾油、耐腐蚀、所有部件均可消毒处理。

操作指南：

1. 打开刺种枪顶端螺帽（32号）。
2. 直接将2cc疫苗液注入玻璃管中。
3. 扣上顶端螺帽、并拧紧。
4. 每次推动刺种枪顶部手柄，都会在鸡翅上刺种一滴疫苗。
5. 接种完毕后，打开顶端螺帽，卸下玻璃管，用清水彻底清洗刺种枪。
6. 消毒：再次使用前，可在125℃对刺种枪进行高温灭菌消毒。

- 31 - 刺种枪枪体
- 32 - 顶端螺帽
- 33 - 橡胶塞
- 34 - 橡胶垫圈
- 35 - 刺种针
- 36 - 固定刺种针的螺丝
- 38 - 玻璃管
- 311 - 刺种针轴
- 313 - 枪体套
- 315 - 手柄弹簧
- 317 - 顶部手柄
- 333 - 配件包 (33, 34, 38)

